

CHECKLIST DI VIAGGIO



ESONERO DI RESPONSABILITÀ: I seguenti consigli per il viaggio hanno uno scopo puramente informativo. Permobil non rilascia alcuna dichiarazione di natura clinica, operativa o di garanzia in merito a qualsiasi prodotto, alle caratteristiche o ai servizi menzionati di seguito.

PRIMA DI PARTIRE



- Carica completamente le batterie.
- Imballa il caricabatterie. Se ti stai recando all'estero, verifica che il caricabatterie sia compatibile.
- Assicurati che la tua carrozzina sia stata sottoposta a manutenzione di recente.
- Individua un rivenditore Permobil autorizzato nella località di destinazione.
- Annota il numero di serie e portarlo sempre con te.
- Valuta se dotarti di ganci per borse, borse per braccioli o del portapacchi Permobil per avere più spazio a disposizione.

SE VIAGGI IN AUTO



- Se viaggi con la tua carrozzina collocata all'esterno della vettura, utilizza un telo impermeabile per proteggerla durante il trasporto.
- Assicurati che la carrozzina sia fissata correttamente alla vettura.
- Eventualmente, utilizza il blocco di sicurezza se prevedi di lasciare la carrozzina incustodita sulla vettura.

SE SI VERIFICA UN INCONVENIENTE CON LA TUA CARROZZINA



- Prima di uscire dall'aeroporto, presenta un reclamo alla compagnia aerea o all'azienda che ti ha fornito il viaggio.
- Contatta un rivenditore Permobil autorizzato in zona o il rappresentante Permobil locale, che farà tutto il possibile per aiutarti a rimetterla in funzione.

SE VIAGGI IN AEREO



- Contatta per tempo la compagnia aerea per predisporre il trasporto della tua carrozzina. Descrivi nei dettagli il tipo di carrozzina che utilizzi e tieni conto delle dimensioni dell'aereo per essere certo/a che risponda alle tue esigenze.
- Tieni presente che alcune compagnie aeree potrebbero chiederti di firmare un documento che le esonera da ogni responsabilità per la tua carrozzina durante il trasporto.
- Annota il tipo di batterie installate e il peso della carrozzina: alcune compagnie aeree potrebbero chiederti queste informazioni.
- Scatta delle foto per documentare le condizioni della tua carrozzina prima del check-in in aeroporto.
- Contatta i servizi di assistenza 5-10 minuti prima del tuo arrivo, in modo che possano essere presenti sul posto per accoglierti.
- Informa l'addetto/a al check-in delle eventuali apparecchiature mediche da te utilizzate, in modo che possa classificarle come merce fragile.
- Chiedi espressamente che la tua carrozzina viaggi in modo stabile e appoggiata sulle proprie ruote principali.
- Rimuovi la parte superiore dello schienale e disponila sul sedile per ridurre l'altezza della carrozzina e agevolare le operazioni di carico e scarico.
- Riponi il joystick all'interno del bracciolo per proteggerlo meglio durante il trasporto.
- Metti i motori di guida della carrozzina in modalità inerziale e spegni l'interruttore generale della carrozzina per consentire al personale della compagnia aerea di spostarla senza guidarla.
- Verifica che il sistema di seduta sia incellofanato prima di caricare la carrozzina, in modo da mantenere uniti lo schienale e gli altri componenti della carrozzina durante il trasporto.
- Se necessario, utilizza il pluriball per proteggere in modo ottimale poggiatesta, display omni e altri accessori.
- Apponi un'etichetta alla carrozzina e alle eventuali parti rimovibili con le tue informazioni di contatto.
- Quando arrivi al gate, chiedi all'addetto/a se puoi parlare con il/la responsabile della rampa. Potrai così fornirgli/le questo promemoria e spiegargli/le come aver cura della tua carrozzina.
- Porta con te il cuscino in aereo per un maggiore comfort durante il viaggio.
- Non temere di far valere le tue esigenze. Perché ciò che va bene per gli altri potrebbe non andare bene per te.

Consulta le istruzioni per l'uso per ulteriori consigli di sicurezza e le linee guida per il trasporto.